

VANTAGGI / CARATTERISTICHE

CEKA SITE è un adesivo e materiale da riempimento che è utilizzato principalmente nella tecnica degli attacchi. Le proprietà anaerobiche di CEKA SITE permettano l'adesione dei componenti mentre il materiale applicato si indurisce più lentamente. Eccellenti valori di adesione per metalli preziosi e non preziosi. Fotopolimerizzazione non necessaria. Lavorazione semplice grazie alla pre-sabbatura. Eccellente indurimento. Applicazione facile. Materiale altamente viscoso. Pulizia facile.

ISTRUZIONI D'USO

Utilizzare il CEKA SITE sempre a temperatura d'ambiente. Sabbare le superficie metalliche da cementare con ossido di alluminio a grana grossa. Applicare il CEKA SITE con il puntale automiscelante. Da ora avete un tempo massimo di lavoro di 1,5 minuti. Il CEKA SITE solidifica sufficientemente dopo 10 minuti. Il materiale in eccesso è stato esposto all'aria e indurisce lentamente e, quindi, non può fungere da controllo. Fare una nuova miscela di CEKA SITE per ogni uso. Opzionalmente utilizzare il CEKA Multi Primer per un'adesione ottimale.

Data di emissione: 09/2014
Opuscolo no. 50.N/F/D/E/I/S-ed.D
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

EFFETTI COLLATERALI

Il contatto diretto con il CEKA SITE non ancora polimerizzato potrebbe causare irritazione cutanea e reazioni allergiche.

STOCCAGGIO E DURATA DI CONSERVAZIONE

Data di scadenza limitata: vedi l'etichetta.
Conservare in luogo fresco tra 4 °C e 10 °C.

CONTENUTO / RIORDINAZIONE

- | | |
|-------------|---|
| # CEKA SITE | 2 x 2 g composite, 6 puntali automiscelanti |
| # 6705 | CEKA Multi puntali automiscelanti 20 pezzi |
| # 6702 | CEKA Multi Primer 5 ml |